

Техника безопасности

- ◆ Не располагайте монитор на неустойчивой поверхности, откуда он может упасть.
- ◆ Не подвергайте аккумуляторы крайним температурам и влажности.
- ◆ Не подвергайте монитор действию прямых солнечных лучей и других источников тепла.
- ◆ Не допускайте попадания жидкости на монитор.
- ◆ Не помещайте ничего внутрь устройства, не ставьте ёмкости с водой на монитор.
- ◆ Во время грозы (особенно с молниями) отключайте штекеры питания и антенны.
- ◆ Не наступайте на провод и не спутывайте его.
- ◆ Не перегружайте розетку внешнего подключения на стене, т.к. это может привести к пожару или поражению током.
- ◆ Протирайте сухой, мягкой тканью.
- ◆ В случае неисправности не ремонтируйте монитор самостоятельно, обратитесь к специалистам по ремонту.
- ◆ Если пульт управления не используется длительное время, достаньте батарейки и уберите его в сухое место.
- ◆ Не располагайте монитор нагретой стороной вплотную к полу или ковру.
- ◆ Убедитесь, что монитор находится в подходящем положении, пожалуйста, устанавливайте его под руководством специалиста.
- ◆ Если устройство не используется длительное время, отключите его от розетки.


Особенности продукта

Особенности интраоральной камеры

1. Интраоральная КМОП камера высокого разрешения
2. Высокое разрешение, ISO, качество и функция автофокусировки
3. Встроенные 6 белых светодиодов высокой яркости с длительным сроком службы.
4. 5 кнопок на ручном блоке и две кнопки сзади для непосредственного управления всеми функциями: стоп-кадр, сохранить, выбор одно/четыре изображения, предыдущее, следующее, удалить; два угла съемки для четкости изображения
5. Поставляется с USB диском для постоянного хранения изображений
6. Поддерживает функцию загрузки по WIFI и QR коду, изображения можно сохранять напрямую в мобильный телефон.
7. Поддерживает беспроводную синхронизацию дисплея с мобильными телефонами, планшетами и компьютерами, загрузку бесплатных приложений.

Опт. сенсор	1/4 CMOS	Хранение данных	USB диск
Разрешение	1080P	Ввод	AHD 1920*1080
Дисплей	1 / 4 изображения	Фокусировка	10-40 мм
Диагональ	17/19 дюймов	Питание	DC 12V
Вывод	Монитор 17/19 дюймов	Соотв. модель	Интраоральная камера


Аксессуары

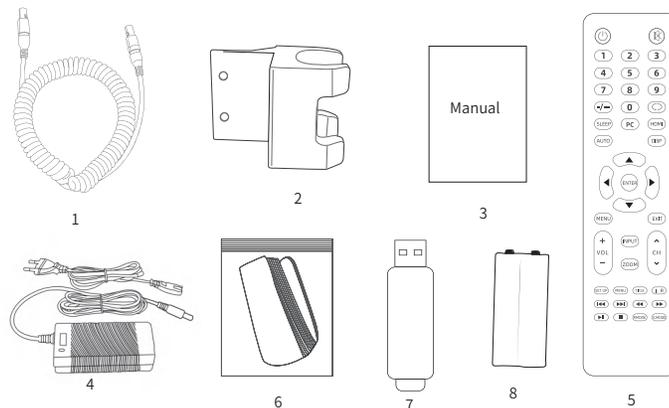

№	Аксессуар	Кол-во
1	8 pin кабель камеры	1 шт.
2	Штатив камеры	1 шт.
3	Инструкция	1 шт.
4	Адаптер питания 12 В / 4А	1 шт.
	Кабель питания	1 шт.
5	Пульт управления монитором	1 шт.
6	Чехлы для камеры	50 шт.
7	USB диск	1 шт.
8	Батарейки (для пульта)	2 шт.
9	Штатив для монитора M-22/M-22A (опционально)	1 шт.

Кнопки управления

Спереди

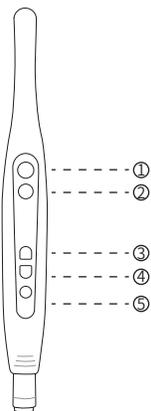

Сзади




- ① 1: Стоп-кадр/сохранить 2: Удерживайте, чтобы записать видео, удерживайте снова, чтобы завершить и закрыть запись видео
- ② 1: Раскладка 1/4 изображения (нажатием 5 кнопки можно заново сделать снимок) 2: Возврат
- ③ 1: Открыть фото-галерею 2: нажмите 1 кнопку, чтобы увеличить рисунок, затем нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть предыдущее фото/видео 3: Нажмите 1 кнопку, чтобы увеличить рисунок, и удерживайте эту кнопку, чтобы открыть QR код для загрузки рисунка
- ④ 1: Открыть галерею видео 2: нажмите 1 кнопку, чтобы увеличить видео, затем нажмите данную кнопку, чтобы просмотреть следующее фото/видео
- ⑤ 1: Удалить 2: удерживайте эту кнопку для функции DEL ALL, нажмите один раз в течение 3 сек., чтобы удалить все изображения/видео

Вид спереди




- 1)、POWER: индикатор питания
- 2)、< : выбор программы - влево
- 3)、> : выбор программы - вправо
- 4)、VOL - : уменьшить громкость
- 5)、VOL + : увеличить громкость
- 6)、MENU: выбрать главное меню
- 7)、INPUT: клавиша ввода видео

Вид сзади

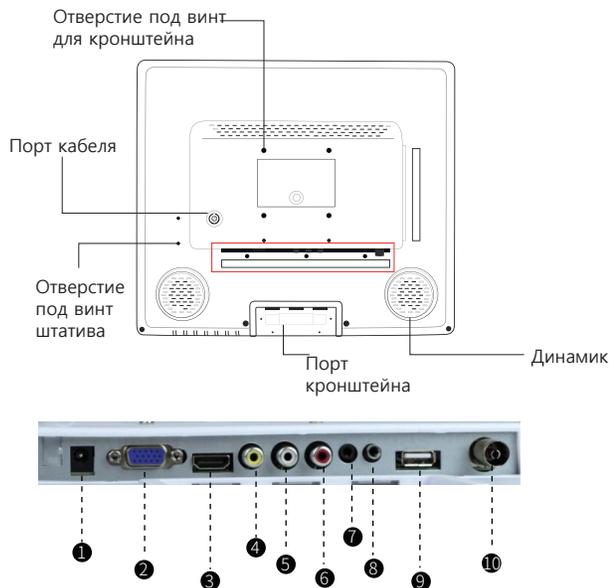

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1). DC-12V: питание | 6). L: левый канал |
| 2). VGA: вход монитора | 7). PC-AUDIO: аудиовход компьютера |
| 3). HDMI: вход HDMI | 8). AUDIO OUT: аудиовыход на наушники |
| 4). VIDEO: вход видео | 9). USB: USB порт |
| 5). R: правый канал | 10). Порт ТВ-кабеля |

Инструкции к пульту управления

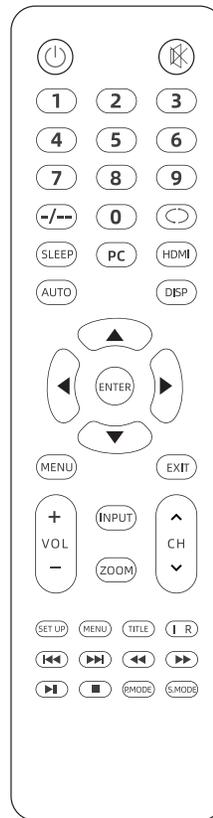


- 1) Power: нажмите эту кнопку, чтобы включить монитор, нажмите снова, чтобы выключить монитор
- 2) Mute: нажмите один раз, чтобы выключить звук, нажмите снова, чтобы включить обратно
- 3) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 числовые клавиши: выбор каналов
- 4) +/-: кнопка выбора медианы
- 5) <: предыдущий канал
- 6) SLEEP: спящий режим
- 7) PC: режим ПК
- 8) HDMI: режим HDMI
- 9) Auto: автоматическая регулировка позиции изображения на дисплее (полноэкранный ПК режим)
- 10) DISP: показать источник
- 11) ENTER: выбрать источник видеосигнала
- 12) ▲ Клавиши со стрелками: нажмите, чтобы выбрать верхний пункт меню
- 13) ◀ Нажмите, чтобы выбрать пункт меню слева
- 14) ▶ Нажмите, чтобы выбрать пункт меню справа
- 15) ▼ Нажмите, чтобы выбрать пункт меню ниже
- 16) Menu: клавиша меню.
- 17) EXIT: выйти из выбранного меню
- 18) VOL +: нажмите, чтобы увеличить громкость
- 19) VOL -: нажмите, чтобы уменьшить громкость
- 20) Input: выбрать видеовход
- 21) ZOOM: увеличение
- 22) CH + backward: нажмите, чтобы переключиться на следующий канал.
- 23) CH - backward: нажмите, чтобы выбрать предыдущий канал
- 24) SET UP: настройки
- 25) MENU: открыть главное меню
- 26) TITLE:
- 27) I R: Infrared remote control receiving
- 28) << предыдущая дорожка
- 29) >> следующая дорожка
- 30) <> назад
- 31) <> вперед
- 32) <> пауза/старт
- 33) <> stop
- 34) P.MODE: выбор режима изображения: пользовательский, стандартный, мягкий
- 35) S.MODE: в выбор звукового эффекта: стандартный, кино, музыка, пользовательский.

Инструкции


1.Соединение ручного блока с кабелем



2.Выровняйте защелку с пазом

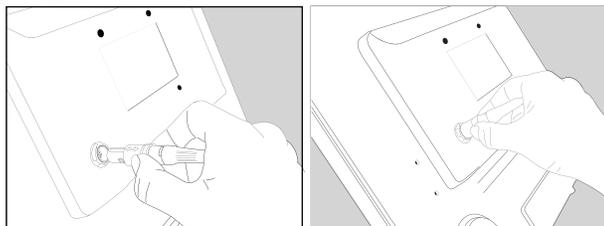

3.Делайте снимки с помощью ручного блока

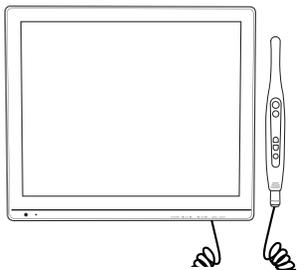

Загрузка снимков по WiFi


Шаг 1

Проглистывайте страницы, чтобы выбрать фото



Шаг 3

Включите WiFi, подключитесь к ID, указанному в левом нижнем углу экрана (пароль 88888888)

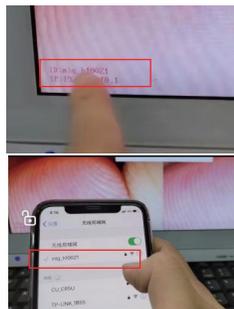


Шаг 2

Удерживайте 3-ю кнопку, чтобы открыть QR код, отсканируйте для загрузки фото



Шаг 4

1. Откройте телефон и отсканируйте QR код (Android: используйте стандартный браузер Apple: используйте сканер QR кодов на рабочем столе)
2. Отсканируйте фото и сохраните его в галерею смартфона

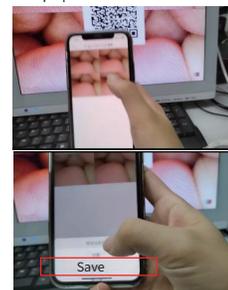


Синхронизация по беспроводному соединению

Беспроводное соединение с телефоном

1. Включите WIFI
2. Найдите тот же ID (введите пароль 88888888 при первом подкл.)
3. Откройте приложение
4. Стартовая страница APP



5. Интерфейс съемки
6. Синхронизация экрана со смартфоном

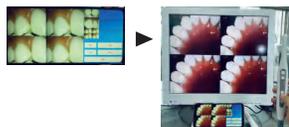

Беспроводное соединение с компьютером

1. Включите WIFI
2. Найдите ID (введите пароль 88888888 при первом подключении)
3. Нажмите connect
4. Откройте приложение



5. Перейдите на стартовую стр.
6. Авторизуйтесь
7. Интерфейс съемки
8. Синхронизация экрана с компьютером



Внимание



Внимание: во избежание удара током не открывайте задний кожух. Для обслуживания обратитесь к специалистам.
Предупреждение: не допускайте попадания на монитор воды и влаги. Это может повредить устройство, привести к возгораниям и ударам током.

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие меры безопасности перед использованием продукта, сохраните инструкцию для будущих обращений.

Устройство

Не касайтесь сигнального коннектора острыми и металлическими предметами, не допускайте попадания жидкостей, чтобы избежать коротких замыканий и повреждения устройства. Если продукт не используется некоторое время, отключайте его от розетки. Не разбирайте устройство, не воздействуйте на него давлением.

Питание

Используйте только оригинальное зарядное устройство от производителя, чтобы не повредить камеру.

Если повреждены шнур или штекер питания, не используйте их. Не ставьте тяжелые предметы на сигнальный кабель и кабель питания. Не подключайте кабели во влажной среде.


Условия среды

Расположите устройство в сухом вентилируемом месте.

Избегайте холодной, жаркой или слишком влажной среды, прямых солнечных лучей и пыльных мест.

Комплексная интраоральная камера

Инструкция

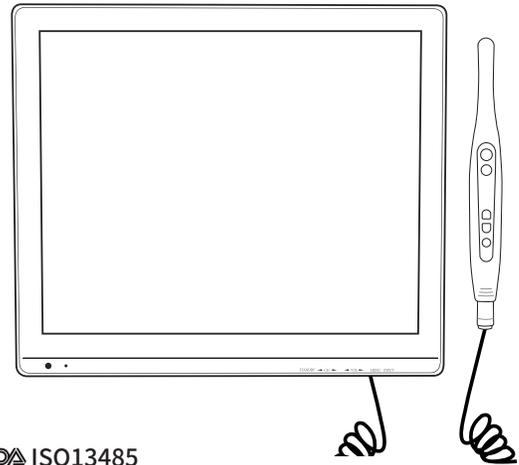

CE FDA ISO13485

Устранение неполадок

-Перед обращением в гарантийный отдел производителя проведите простую проверку по следующим пунктам, если проблему решить не удастся, запишите модель монитора и серийный номер и обратитесь к контрагенту в вашем регионе.

1) Монитор

Нет звука и изображения

- Убедитесь, что шнур питания вставлен в розетку, а в розетке есть питание.
- Убедитесь, что вы нажали кнопку включения на передней панели
- Проверьте настройки яркости и контрастности
- Проверьте громкость

Нормальное изображение, но нет звука

- Проверьте громкость
- Возможно нажата кнопка отключения звука на пульте
- Звуковая система

Черно-белое изображение

- Отрегулируйте настройки цвета
- Проверьте цветовую систему

Звук и изображение с помехами

- Найдите близко расположенные электроприборы и уберите их подальше
- Проверьте контакт штекера питания с розеткой

Зернистое изображение

- Проверьте ориентацию, расположение и подключение антенны

Не работает пульт удаленного управления

- Замените батарейки в пульте
- Очистите верхнюю сторону пульта
- Проверьте контакты батареек

2) Интраоральная камера

Если возникли проблемы с данным продуктом, попробуйте следующие меры по их устранению. Если решить проблему не удастся, обратитесь к дилеру или производителю.

№	Неисправность	Решение
1	Не реагирует переключатель (вкл/выкл)	1.Проверьте, включен ли штекер в розетку 2.Проверьте подключение кабеля
2	Невозможно сделать стоп-кадр	1. Проверьте подключение ПК или монитора к хосту 2. Проверьте, установлен ли драйвер на компьютере, и правильность настроек
3	Изображение на экране выглядит размытым	При первом применении машина находится в нормальном тепловом режиме, позже все будет в норме
4	После стоп-кадра экран дрожит	Детектор должен быть неподвижен, чтобы снятое изображение имело вид неподвижной картинки, что может быть улучшено при повторном использовании
5	Изображение на экране имеет пятна	1. Проверьте, нет ли пятен на мониторе 2. Проверьте, нет ли пятен на линзе 3. Если проблема не в этом, обратитесь к производителю

Условия гарантии:

-Пожалуйста, сохраните счет на покупку и гарантийный талон. Перед использованием внимательно заполните содержимое гарантийного талона, отправьте профиль пользователя в наш сервисный центр, чтобы мы могли предоставить наилучшие услуги, в случае неисправности устройства сразу обращайтесь в наш сервисный центр. Самостоятельный разбор, неправильное использование или обстоятельства непреодолимой силы не являются гарантийными случаями.